


产品结构
PRODUCT STRUCTURE

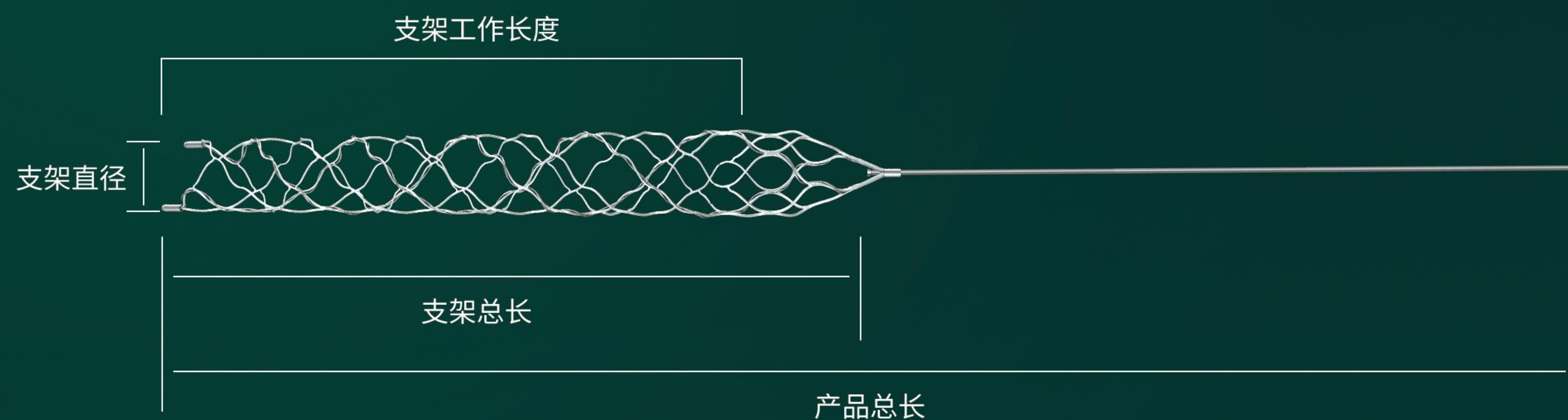

产品参数
PRODUCT PARAMETERS

规格型号	支架直径	支架工作长度	支架总长	产品总长	推送导丝直径
301003530	3.5mm	30mm	38mm	189cm	0.39mm
301004030	4.0mm	30mm	38mm	189cm	0.39mm
301006040	6.0mm	40mm	50mm	190cm	0.39mm

- 用于患者缺血性卒中发作8小时内移除堵塞在颅内大动脉血管内的血栓以达到恢复血流的治疗目的，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段。



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼

电话：86-0512-69138730

邮箱：Information@zenithmedtech.com

网址：Zenithmedtech.com



中天天弋®取栓支架

Zenith Stent Retriever

国械注准20233030062

创新科技

让血管治疗

更简单



中天天弋[®]取栓支架




1点创新

> 国际首创全螺旋结构、非对称双波形设计，利用阻力不对称原理，实现回拉自旋转

3大操作升级

>>> 更好的显影性

• 支架全长度显影，释放更可控，操作更安全。

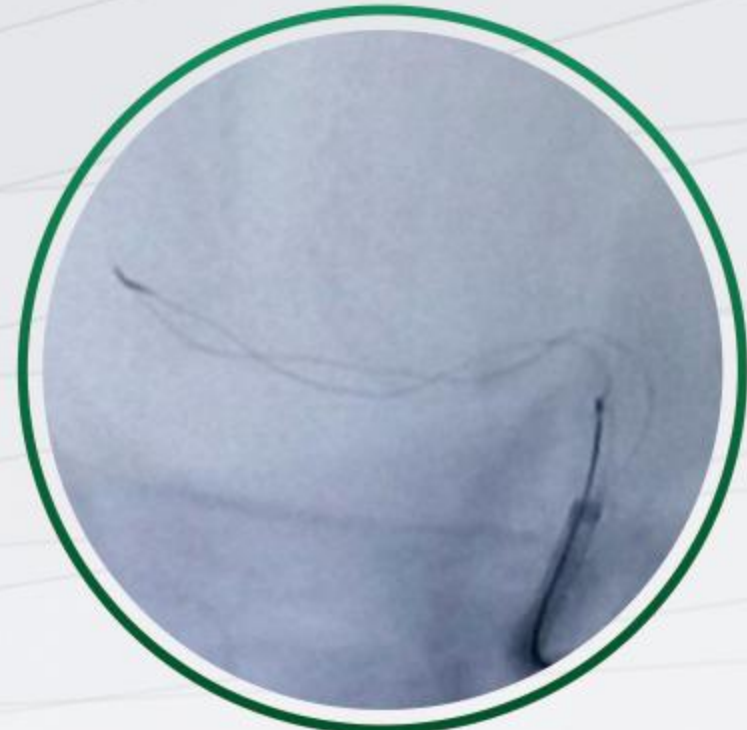

>>> 更好的器械兼容性

• 0.015" 推送导丝可兼容市面上主流球囊，支持半回收，满足多种术式需求。

>>> 更便捷的输送性

- 全系适配中天天巡[™]0.021" 微导管，过栓更灵动；
- 多规格支持中天天巡[™]0.017" 微导管，轻松双系统。


3大技术突破

>> 更强的血栓抓取能力

- 支架的回拉自旋转设计，回拉的过程中将血栓缠绕卡抱，利用小梁切线运动实现持续主动抓栓，从而提高取栓效率。

>> 更强过弯稳定性&更低血栓脱落风险

- 支架自旋转将血栓缠绕卡抱在支架上，降低血栓脱落或逃逸风险，增加过弯稳定性。

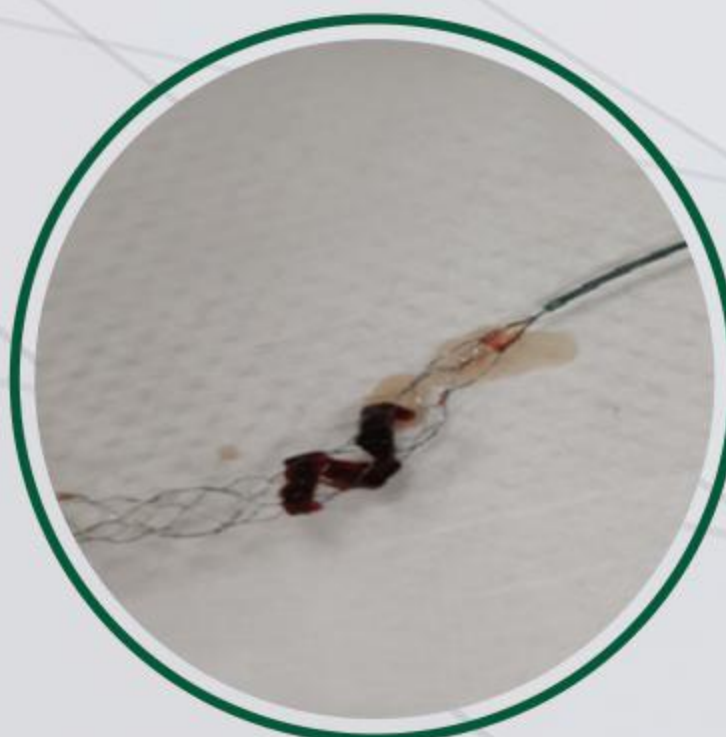

>> 更少内皮损伤

- 自旋转遵循“最小阻力定理”，即支架发生形变或运动时选择阻力最小的方向，从而降低内皮损伤。

临床数据

CLINICAL DATA

项目	中天天弋 [™] 取栓支架	对照组取栓支架
平均取栓次数	1.5	1.7
一次再通率	62.5%	60.2%
90天良好预后	65.1%	46.4%
(术后24h内)症状性颅内出血(SICH)	1.8%	5.2%
全因死亡率	12.3%	24.1%
器械缺陷	无	1例